

何かと出会って 新たな発見

暮らしほつとワーク

—バリアフリーへのかけ橋—

塩竈神社



Vol.43

July 2011

今号の
CONTENTS
もくじ

ご家族とのコミュニケーションなどでお困りではありませんか?
意思伝達に関する
機器や制度について…………… P2~3
新ネタ発信 …………… P4~5

製作・改造事例の紹介 …………… P6
リサイクル相談事業部より…………… P7
第14回 国際福祉健康産業展
ウェルフェア2011レポート …………… P8



ご家族とのコミュニケーションなどでお困りではありませんか？

意思伝達に関する 機器や制度について



コミュニケーションとは

人が社会で生活していく上では他者との協調は不可欠で、そのためには「双方向性のある意思の疎通」が必要になり、これがコミュニケーションといえます。コミュニケーションの障害は状況により

- 自らの意思を表出（表現）できない
- 相手の意思を獲得（理解）できない
- 言語の理解ができない（知的な障害など）
- 他者との協調性がとれない（発達障害など）

の4つに大別ができます。それぞれにおいて、相手との関わり方の工夫や配慮も含めた、アプローチも異なりますが、今回は「自らの意思を表出できない」障害を支援する機器の種類や制度について紹介します。

「文字盤」、「透明文字盤」

50音や定型句を紙やアクリル板等を書いておいたもので、指や視線で指し示し、言葉を伝えることができます。基本的には、1対1の会話で用いますが、相手（読み手）も慣れていないと読み取りが困難な場合もあります。

電源が不要で持ち運びもできますので、外出先も含めて手軽なコミュニケーション手段として便利です。公費補助はないですが、安価な製品や手作り品を利用する場合もあります。



「携帯用会話補助装置」

多くは、文字やシンボル等を書いた鍵盤（キー）を押して、合成音声や録音音声の再生や文字表記させる機器ですので、手指等の動きが残存している場合に利用できます。また、入力したメッセージの保存も可能であるとともに、プリンタや音声出力も可能です。

乾電池やバッテリー等でも動作するため、携帯性にも優れています。障害者自立支援法では、日常生活用具に該当しますので、公費補助対象となる場合があります。


<日常生活用具給付等事業での対応について>

障害者自立支援法においては、市町村地域生活支援事業の1つに含まれ、携帯用会話補助装置は情報・意思疎通支援用具に該当します（市町村により具体的な内容が異なる場合があります）。

名古屋市の場合、携帯用会話補助装置は、「音声機能もしくは言語機能障害又は肢体不自由の方であって発声・発語に著しい障害を有する方（原則として学齢児以上）」を対象に、上限98,800円（ただし、原則として一割自己負担）となっています。



「重度障害者用意思伝達装置」(文字等走査入力方式)

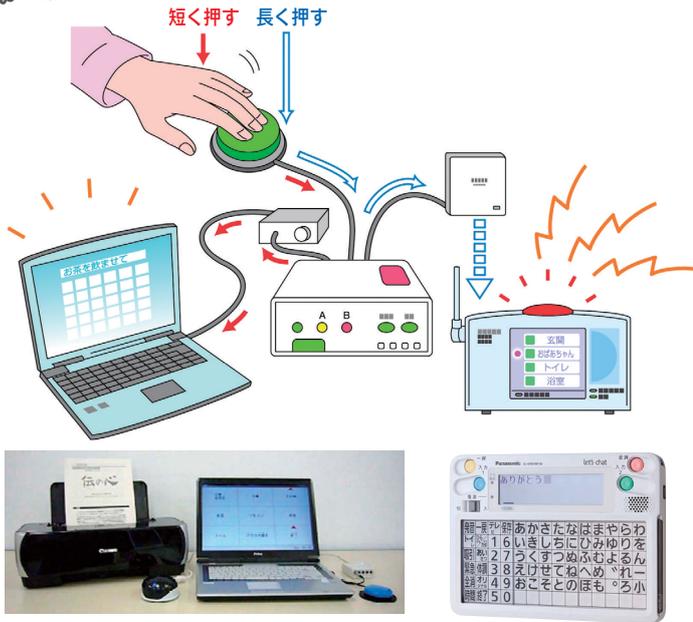

1つの入力装置(操作スイッチ)を用いて、スキャン操作の繰り返し操作(走査入力方式)で、ひらがな等の文字綴り選択による文章の表示や発声、要求項目やシンボル等の選択による伝言の表示や発声等を行う機器です。画面表示や入力したメッセージの保存も可能であるとともに、プリンタや音声出力も可能です。


利用する人の身体状態にあった、操作スイッチの適合が必要になってきますが、意思伝達に加えて「通信機能」や「環境制御機能」を付加したものもあります。障害者自立支援法での補装具(一部の自治体では、難病対策における難病患者の日常生活用具)にも該当しますので、公費補助対象となる場合があります。



「重度障害者用意思伝達装置」(生体現象方式)

生体現象(脳波や脳の血液量等)を解析して「はい・いいえ」を判定する機器です。本人から能動的に意思を表出するのではなく、相手からのひとつの質問に対する「はい・いいえ」の判定結果が画面で表示され、相手が必要を読み取るものです。

しかし機器の特性上、必ずしも100%本人の「はい・いいえ」の意思が反映された回答が得られるものではありませんので、同一の質問を繰り返し、答えてもらうことで正答率を上げる工夫も必要です。障害者自立支援法での補装具に該当しますので、公費補助対象となる場合があります。

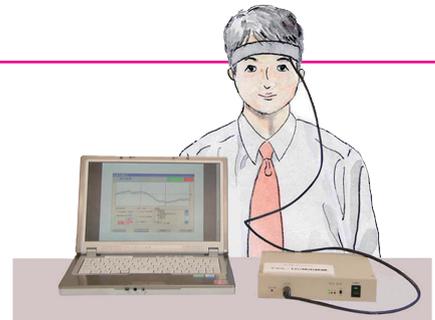

<補装具費支給制度での対応について>

障害者自立支援法においては、補装具費支給制度となり、身体障害者更生相談所による入力スイッチの適合や選択機種の妥当性の判定を経て、本体および入力装置等の付属品の購入費が支給(ただし、原則として一割自己負担)されます。

対象者の共通要件は「重度の両上下肢及び言語機能障害者であって、重度障害者用意思伝達装置によらなければ意思の伝達が困難な者。」であり、方式・機能により細かい要件や支給上限金額が異なります。



意思伝達ができることは

意思伝達が可能になりコミュニケーションが成立することで、人は日々の生活において生き甲斐や、社会を構成する一員としての自己の役割を見出すことができ、社会で暮らすことにおいて重要な意味をもつこととなります。つまり、コミュニケーション自体が社会参加のための大切な活動(行為)です。

なごや福祉用具プラザでは、IT支援を含めたコミュニケーション支援の相談を行っています。身体の残存機能だけでなく、ご本人やご家族の要望や生活環境を考慮して、よりよい方法の提案や機器選定も行っています。また、「重度障害者用意思伝達装置」(文字等走査入力方式)のための操作スイッチの適合のための訪問相談も実施しています。まずは、ご相談ください。



新ネタ発信

なごや福祉用具プラザ追加常設品のご紹介です。

その他ご紹介できなかった半年間の期間限定の新製品、追加常設品などもございます。是非一度プラザまで足をお運びください。

アウルサポート バッククッション

参考価格
21,000円(税込)

特徴
座位バランスを向上する車いす用姿勢保持背クッションです。腰パッド・背パッドの位置を調整でき、体格に合わせた座位姿勢に対応。



アウルサポート シートクッション

参考価格
21,000円(税込)

特徴
座位バランスを向上する車いす用姿勢保持クッションです。エクスジェルが減圧し、アウルアンカーが前ズレを抑制します。



スキット2(ツー)

参考価格
129,000円(非課税)

特徴
座幅は標準タイプの40cmを確保しながら、全幅はわずか48cmとコンパクトな車いすです。新幹線の通路など狭い場所でもとり回しが楽に行えます。



エアバック式担架エクストレッチャー

参考価格
54,600円(税込)

特徴
レバーを引くと瞬時に膨張し担架になります。収納時は小さく保管場所もとりません。重さは2.5kgと持ち運びにも便利です。



介護用チェア

参考価格
26,250円(税込)

特徴
背当たりの良いハイバックタイプの介護チェアです。座面はクッション性を高めるためウェービングテープを使用。座りに安定感のある全肘タイプ。



リクライニング昇降座いす「リク楽」

参考価格
186,900円(税込)

特徴
電動式立ち上がり補助椅子です。手元のスイッチで座面高を15~45cmの範囲で調整でき、幅広座面で移乗負担を軽減します。背もたれリクライニング機能付き。



NEWコメット

参考価格
63,000円(税込)

特徴
工事不要でユニットバス対応型浴室内手すりです。突張力はほとんど必要無く取付可能。高支持で安全に入浴動作が行えます。



シャンプーハット

参考価格
1,365円(税込)

特徴
サイズ調整が可能なシャンプーハットです。3段階ホックで頭囲サイズにあわせることができ、シャンプー液やすすぎ湯が目・耳に入るのを防ぎます。





なごや福祉用具プラザでは
年2回の常設品展示の選定と
毎月の新製品展示の選定をおこなっております。
新しい機能や工夫がある福祉用具が増えております。
是非、一度ご覧になってお確かめください。

※「特徴」の項目は、申請企業の説明文を転記しております。※試用体験や製品に関するお問合せは、なごや福祉用具プラザのカウンターまでどうぞ。

アルファプラ ソラ

参考価格

207,900円(非課税)

特徴

安定性と柔らかさを持つウレタンをベースにリスクの高い腰部にエアセルを搭載したハイブリッドマットレスです。エアセルはチェッカーオルタネイト方式で体幹を遮断しません。



ディンプルマットレス

参考価格

86,100円(税込)

特徴

変形することでウレタンの反力を抑えるディンプル+スリットの特製構造のマットレスです。背骨のSラインを保持し理想的な寝姿勢を実現します。



移座えもんシートMLサイズ

参考価格

3,990円(税込)

特徴

体の下に敷いて摩擦を軽減し、ベッド上での移動、体位変換を容易にします。ズレによる体への負担と、移乗介助時の腰痛を予防します。頭部から臀部まで覆えるサイズです。



マルチグローブ

参考価格

3,990円(税込)

特徴

体を滑らせて移動することが出来、腰痛予防に効果的。体位変換にともなう摩擦を軽減し床ずれの発生原因を抑えます。内面には滑り止め加工が施されています。



バルーンソフトグリップ

参考価格

1,575円(税込)

特徴

ソフト感覚のグリップで、柄が自由に曲げられ容易に手にフィットさせることができます。指の力が低下した人、指の皮膚が弱い人、握る力が弱い人にお使いいただけます。食器洗浄器対応。



らくらく汁椀

参考価格

840円(税込)

特徴

持ち手の付いた汁椀です。手の力が弱い方でもしっかりとお椀を持つことができ、温かい食べ物でも安心召し上がることが出来ます。。電子レンジ対応可能。



ステッキjam(ジャム)

参考価格

3,990円(税込)

特徴

テーブルなどの天板に取り付け可能な杖ホルダーです。本体内にホールド部が収納できるので使用しないときにも邪魔になりません。



折りたたみカーボンステッキ

参考価格

12,600円(税込)

特徴

軽量で頑丈なカーボン製の杖です。携帯に便利な折りたたみ式。グリップまでカーボンの一体成形です。





製作・改造事例の紹介

プラザのご利用者さんへ道具を提供し、ご本人の生活が豊かになった例を紹介します。

ご本人はリウマチがあり人工透析をされている身体障害者手帳1級、要介護4の方です。普段は車いすで生活され、両足こぎで移動されています。足の裏は問題ないのですが、それ以外の皮膚が擦れると痛みを伴うそうです。皮膚がとてもデリケートで、布団のこすれや身体を動かした時にぶつける心配もあるため、寝ている時も靴下で足を保護するようにとの医師の指示を受けていました。本人の足は浮腫で腫れ上がっており、肌の変色もありました。そこで足を保護する靴下を作ることにしました。

材料は手に入りやすいものばかりですし、簡単に作ることができます。

材料リスト

- 伸びる生地 (綿95%、ポリウレタン5%) 1枚
- 糸 少々

材料費は合計1,400円程度

作り方

生地を裁断し、端を縫っていきます。その際には縫い目が外側に来るようにして、内側の足には当たらないようにします。口ゴムを使わないので、採寸を正確に行います。

使い方

試作時は普通の生地にゆるい口ゴムをつけていましたが、締め付けが気になるとのことで、実際にお渡しするものには口ゴムはつけず、伸びる生地を用いて留めの代わりにするようにしました。この靴下に足を通すと肌触りが良く、締め付けがないこと、脱げにくく、生地が伸びるため履き心地が良いとの感想をいただきました。



試作した靴下 (ゆるい口ゴムあり)



お渡ししたゴムなし靴下 (長・短あり)

なごや福祉用具プラザでは福祉用具の製作・改造を通じて、ご本人やご家族等の生活を豊かにするお手伝いをいたします。お気軽にご相談ください。

リサイクル & 相談事業部より

バリアフリー宿のご案内

この夏、三河湾随一の眺め
吉良温泉山頂に建ち、
三河湾の海の幸を使った料理、
健康と美容の湯も楽しめるバリアフリーの旅館で
夏の思い出をつくってはいかがでしょうか？



NPO癒しの宿 福の神 吉良の庄 (どなたも泊まれる料理旅館)



住所 〒444-0513 愛知県西尾市吉良町宮崎寺ノ上30番地1
TEL 0563-32-2905
FAX 0563-34-1126
ホームページ <http://kiranoshō.jp/>
交通アクセス
名鉄吉良吉田駅より車で7分
東名岡崎ICより車で50分
東名音羽蒲郡ICより車で40分

愛知県の「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」に基づき改修しコンクール受賞した全館バリアフリー。
天然雲母水と天然ラドン水の健康と美容の湯に車いすのまま利用可能な家族風呂、大浴場、露天風呂あり。

宿泊料金
一般の方、1泊2食付1万2千円より。
障害者手帳保持者、要介護認定者、75歳以上
1泊2食付1万円より。
日帰り入浴も可能。他、詳細は直接問い合わせをお願いします。



周辺の観光

- ▶ 宮崎・恵比寿海水浴場
車いす対応トイレあり (マリンハウス内)
- ▶ 一色さかな広場
身障者用駐車場、車いす対応トイレあり
- ▶ 愛知こどもの国
身障者用駐車場、車いす対応トイレあり

バリアフリー度については身体、障害状況によって判断が異なります。ご利用の際は、各施設へ備品、設備についてお問い合わせください。

AJUリサイクル相談事業部では
リサイクル相談他、福祉用具の
販売とレンタル、様々な福祉情報
を提供しています。
お気軽におたずね下さい。

福祉用具リサイクル相談事業部は…なごや福祉用具プラザ内にあります。

社会福祉法人
AJU自立の家
自立生活情報センター
リサイクル相談事業部

昭和区御器所通3-12-1
御器所ステーションビル3F なごや福祉用具プラザ内
TEL052-851-0059 FAX052-851-0159
営業時間：火曜日から日曜日 10:00~18:00
休業日：月曜日、祝休日、年末年始 (月曜日が祝休日の場合、火曜日も休み)
【E-mail】recyclesodan@aju-cil.com

特別養護老人ホーム サービスネットワーク南陽

デイサービスセンター南陽
居宅介護支援事業所南陽
ケアハウス南陽

〒455-0863
名古屋市港区新茶屋一丁目1701
社会福祉法人 華陽会
TEL (052) 303-0152



地機密着型 特別養護老人ホーム 介護付有料老人ホーム 華の郷 南陽

〒455-0863
名古屋市港区新茶屋一丁目1729
華の郷 南陽
TEL (052) 304-1147





第14回 国際福祉健康産業展 ウェルフェア2011レポート

2011年5月20日(金)~22日(日)

第14回 国際福祉健康産業展
Welfare 2011



第14回国際福祉健康産業展「ウェルフェア2011」が5月20日(金)から22日(日)まで、ポートメッセなごや2号館(名古屋市国際展示場)で開催されました。昨年までは3号館での開催でしたが、今年は一回り面積の小さい2号館となり、来館者も少なくなるのではないかと心配しましたが、71,475人の来場者があり、昨年を1,096人上回りました。

プラザの展示ブースでは、多くの来場者で通路も通りにくくなるほど大盛況でした。

昨年は福祉用具の展示のほか、リフト移乗の実演を行いました。今年も実演を重視して、車いすフィッティング、リフト移乗、ベッド操作の3つを実施して大勢の皆さんに見ていただくことができました。

22日(日)11:00-12:00には会

場内ワークショップとして「大地震に備えて～家具の転倒防止対策のススメから、地域の見守り支援へ」と題して、プラザ非常勤の児玉道子氏の講演があり、皆さん熱心に聞かれていました。

また自具・被服・パソコンのボランティアさんによる相談や実演に人気があり、多くの方々に立ち寄っていただくことができました。



社会福祉法人 名古屋市総合リハビリテーション事業団

なごや福祉用具プラザ

〒466-0015
名古屋市昭和区御器所通
3丁目12-1
御器所ステーションビル3F
TEL (052) 851-0051
FAX (052) 851-0056

- 営業時間/
AM10:00~PM6:00
- 営業日/火曜日~日曜日
- 休業日/
月曜日・祝休日・年末年始
(月曜日が、祝日にあたる日は翌日も休みになります)

● ホームページ <http://www.japan-net.ne.jp/nrc/plaza> ● 電子メール nrc4@japan-net.ne.jp



暮らしほっとワーク第423号 発行日/平成23年7月15日
編集・発行/なごや福祉用具プラザ

この広報誌は再生紙(古紙パルプ配合率100%、白色度83%)を使用しています